

## Sikkerhed og opbevaring

- Rygning forbudt ved iltbehandling
- Tag kun den ordinerede mængde ilt
- Opbevar iltudstyret forsvarligt (ikke i direkte i sollys)
- Arbejdstemperatur +5 til +40 grader
- Sørg for god ventilation, dæk aldrig iltudstyret til med klæde eller lignende
- Luk/sluk altid for iltudstyret når det ikke er i brug
- Sikkerhedsafstand til tændte cigaretter, tændt stearinlys og lignende skal være min. 2 meter
- Foretag ikke iltbehandling ved gaskomfur
- Brug aldrig værktøj på iltudstyret
- Hav rene og tørre hænder.
- Brug ikke fedtholdige cremer i ansigtet

**MEDICAL DANMARK A/S**

Industribuen 24, 5592 Ejby

E-mail: [info@medical.dk](mailto:info@medical.dk)

# Transportabel Iltmaskine



---

## BRUGERMANUAL

---

**MEDICAL DANMARK A/S**

Industribuen 24, 5592 Ejby

E-mail: [info@medical.dk](mailto:info@medical.dk)

## FreeStyle Rejsetaske med sparefunktion

Rejsetasken virker på samme måde som en traditionel iltmaskine, dog med den forskel, at den har indbygget sparefunktion.

Det vil sige, at rejsetasken ikke giver kontinuerligt ilt (konstant flow) men giver pulserende ilt i takt med vejrtrækningen. Derfor har det været muligt at bringe rejsetasken ned på den aktuelle størrelse og vægt.

Der er mulighed for ubegrænset drift ved tilslutning af rejsetasken til lysnettet. Ligeledes vil dette også kunne lade sig gøre ved tilslutning til 12V strømforsyningskilde, f.eks. bil, båd eller campingvogn.

Rejsetasken er med indbygget batteri og giver op til 3½ times drift, ved 1 liter i minuttet.

Rejsetasken kan yderligere tilsluttes et batteribælte der giver mulighed for en samlet drift op til 13½ time, ved 1 liter i minuttet.

For at sparefunktionen på rejsetasken skal virke optimalt, må der kun sættes max. 180 cm. iltbrille på maskinen.

Rejsetasken skal behandles med forsigtighed og tåler ikke fugt og stød.

Vigtigt: Inden ibrugtagningen er det vigtigt at sikre sig, at alt tilbehør er til stede. Se tilbehørs og tidsskema til rejsetasken.

## Tilbehør og tidsskema

### til rejsetasken

- Strømforsyning til iltmaskinen
- Strømforsyning til batteribælte
- Strømforsyning til bilen (12 V)
- Alu. Kuffert
- Bæretaske
- Brugervejledning
- Iltbriller

Iltmaskinens driftstid ved internt batteri:

1 l/m	3½ time
2 l/m	2½ time
3 l/m	2 timer



Iltmaskinens driftstid ved eksternt batteri:

1 l/m	10 timer
2 l/m	6 timer
3 l/m	5 timer

Iltmaskinens totale driftstid incl. batteribælte:

1 l/m	13½ time
2 l/m	8 ½ time
3 l/m	7 timer

## Rejsetaskens funktioner

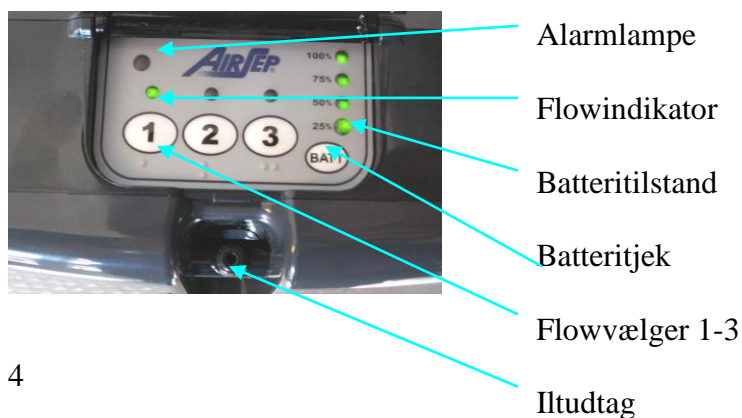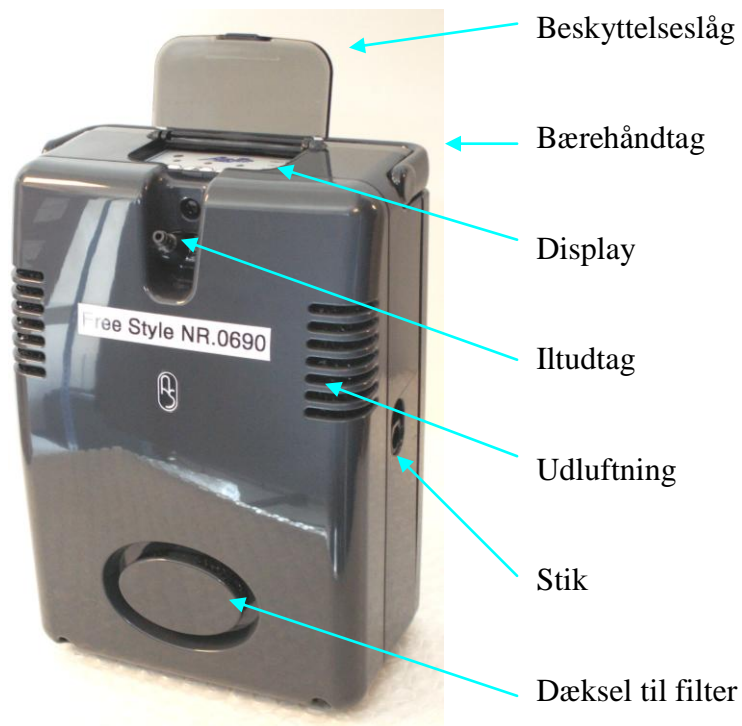

## Betjeningsvejledning

1. Placer rejsetasken således at der ikke blokeres for luftind- og udtag.
2. Vælg den ønskede strømforsyning: lysnet, batteribælte eller 12V.
3. Tilslut iltbrillen til iltudtaget.
4. Tænd for rejsetasken ved at trykke på flowvælger 1-3 for det ønskede flow der er anvist af lægen. Efter en kort alarmlyd vil rejsetasken begynde at arbejde.
5. Den grønne lampe lyser nu over det ønskede flow, og indikerer at rejsetasken er tændt. Når rejsetasken registrerer en vejrtrækning vil den sende pulserende ilt igennem næsebrillen. Den grønne flowindikator vil lyse hver gang der bliver registreret en vejrtrækning.
6. Når rejsetaskens inhalationscensur aktiveres ved vejrtrækning, afleverer rejsetasken den ønskede mængde ilt.
7. Hvis flowet eksempelvis ændres fra flow 1 til flow 2, vil man kunne høre en forandring i kompressorens lyd, hvilket er normalt.
8. For at slukke for rejsetasken trykkes der på den aktive flowvælger og rejsetasken slukker.
9. Rejsetasken vil efter to minutters brug være oppe på maksimum iltkoncentration.
10. Dæksel til filter afmonteres ved at tage fat med tommel og pegefinger på hver side af dækslet. Dækslet kan nu trækkes af og støvfilteret bag dækslet kan nu renses. Dette gøres minimum en gang dagligt ved dagligt brug.
11. Ved lav batteritilstand høres en kort gentagne alarm og den gule lampe (25% BATT ) vil lyse. Tilslut hurtigst muligt rejsetasken til en strømkilde.
12. Hvis næsebrillen tilstoppes og rejsetasken ikke registrerer vejrtrækning over en kort periode, vil en alarm lyde.
13. Hvis alarmlampen lyser gul eller rød, kontakt Medical Danmark.

## Rengøring af rejsetaske og tilbehør

Det er vigtigt at holde rejsetasken fri for fedt, støv og fugt.

Vigtigt: Rejsetasken må ikke være tilsluttet nogen strømkilde ved rengøring.

Rejsetasken og tilbehøret tørres forsigtigt af i en hårdt opvredet klud og alle dele lufttørres i ca. 10 min.

Dækslet til filteret tages forsigtigt af og filteret renses ved at ryste eller støvsuge dette. Dette gøres en gang dagligt.



Dæksel til filter

Vigtigt: Ved driftsforstyrrelse på rejsetasken kontaktes Medical Danmark A/S på telefon: 65 93 80 18.

## Opladning af internt og eksternt batteri

Sørg for, inden ibrugtagningen af FreeStyle Iltmaskine, at internt og eksternt batteri er fuldt opladt.

Det interne batteri i rejsetasken er ca. 3½ time om at oplade til fuld status. Batteribæltet (eksterne batteri) er ca. 3 timer om at oplade til fuld status.

Når der lades på rejsetasken vil de grønne dioder i ladedisplayet vise tilstanden af opladningen fra 25% til 100%. Når der lades på batteribæltet vil de grønne dioder i ladedisplayet vise tilstanden af opladningen fra 25% til 100%.

For at oplade rejsetasken tilsluttes AC-strømforsyningen i stikket på siden af rejsetasken. Når den grønne diodelampe tændes ved 100% er rejsetasken fuldt opladt.

For at oplade batteribæltet tilsluttes DC-strømforsyningen til stikket i batteribæltet. Når den grønne diodelampe tændes ved 100% er batteriet fuldt opladt.

Der er mulighed at tilslutte rejsetasken til bilens 12V strømforsyning. Tilslut stikket til bilens 12V cigarettænder og monter stikket i siden af rejsetasken. Det er nu muligt at drive rejsetasken samtidig med at det interne batteri oplades.

Eksempel på fuldt opladt batteri  
For at aktivere batteriindikatoren  
Trykkes der på BAT og de grønne  
Lamper viser batteriets status.

