

RENGØRING AF FORSTØVERKAMMER



1. Fjern slangen fra bunden af forstøverkammeret. Dette bør gøres ved at vrikke forsigtig med den. Det er ikke nødvendigt at rense slangen, fordi den ikke har kontakt med medicinen.
2. Skru låget af forstøverkammeret og fjern forstøverindsatsen.
3. Vask maske og forstøverens dele i varmt vand med et mildt opvaskemiddel, og skyl grundigt.
4. Derefter lægges disse dele i en blanding af 3 dele destilleret/koldt kogt vand og 1 del hvid eddike (5% surhedsgrad) i 30 minutter.
5. Tag delene op af eddikeopløsningen, skyl under varmt vand og lad dem lufttørre. Tør aldrig delene med viskestykke eller vask dem i opvaskemaskinen.

ADVARSEL:

Ryning og brug af åben ild er forbudt under behandling.

MEDICAL DANMARK A/S

Medicinsk Forstøverkammer

med maske (System 22)



BRUGERMANUAL

MEDICAL DANMARK A/S

BRUGERVEJLEDNING

Billede 1



- ← Maske med ventilationshuller
- ← Medicinsk forstøverkammer
- ← Ilt / luftslange med studs

Billede 2



- ← Forstøverkammertop
- ← Forstøverkammerindsats
- ← Forstøverkammerbund

Medicinsk forstøverkammer (system 22) kan drives på følgende tre måder:

- Atmosfærisk medicinsk luftflaske
- Medicinsk iltflaske
- Kompressor (forstøver)

Luft- og iltflaske skal være monteret med reduktionsventil indstillet på 8 liter i minuttet.

For at opnå maksimal forstøvning skal der forefindes et bartryk på 0,6 til 1,2 bar og et flow på minimum 8 liter i minuttet.

Forstøvertid ved 4 – 6 ml er 8 til 12 minutter.

Fyldning af forstøverkammer:

Skru forstøverkammertop af (drej mod uret) og hæld medicinen i forstøverkammerets bund. Se billede 2.

Sørg for at indsatsen sidder korrekt ved lukning af forstøverkammeret.

Monter forstøversættet som billede 1.

Det er vigtigt at du sidder behageligt og der er ro omkring dig inden du går i gang med behandlingen, og giv dig selv den fornødne tid til inhalationen.

Når forstøverkammeret er tomt er behandlingen færdig.

Er der spørgsmål til ovenstående kontakt din læge, sygeplejerske eller Medical Danmark.