

RENGØRING

Rengøring af kabinettet foretages med en fugtig klud opvredet i et mildt opvaskemiddel. Undgå kontakt med overdreven fugtighed.

RENGØRING AF MEDICINFORSTØVER EFTER HVER BEHANDLING

1. Fjern slangen fra bunden af medicinforstøveren. Dette bør gøres ved at vrikke forsigtig med den. Det er ikke nødvendigt at rense slangen, fordi den ikke har kontakt med medicinen.
2. Skru låget af medicinforstøverens beholder og fjern midterstykket.
3. Vask mundstykket/maske og forstøverens dele i varmt vand med et mildt opvaskemiddel, og skyl grundigt.
4. Derefter lægges disse dele i en blanding af 3 dele destilleret/koldt kogt vand og 1 del hvid eddike (5% surhedsgrad) i 30 minutter.
5. Tag delene op af eddikeopløsningen, skyl under varmt vand og lad dem lufttørre. Tør aldrig delene med viskestykke eller vask dem i opvaskemaskinen.
6. Når delene er helt tørre, sættes delene sammen igen og anbringes i opbevaringsrummet.
7. Genbestilling af dele til medicinsk forstøvning kontakt Medical Danmark A/S.

MEDICAL DANMARK A/S




Forstøver Salter Aire Plus



BRUGERMANUAL

MEDICAL DANMARK A/S

BETJENINGSVEJLEDNING

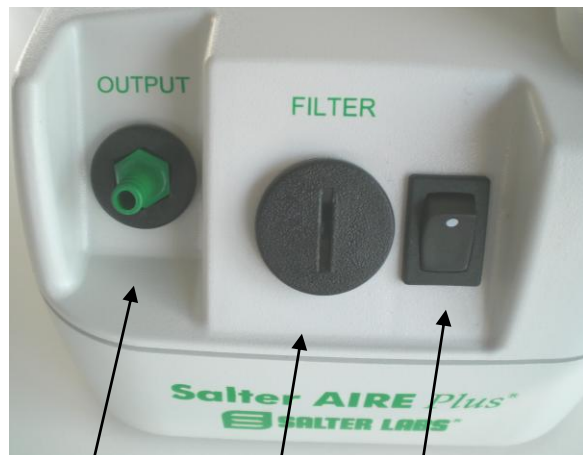

Luftudtag

filter

tænd og sluk

1. Anbring apparatet på et stabilt og fladt underlag fri for andre ting. Vælg et sted i nærheden af en stikkontakt, hvor du kan sidde bekvemt under behandlingen.
2. Sæt stikket i stikkontakten. Der må ikke anvendes forlængerledning, og apparatet må ikke sættes til en stikkontakt sammen med andre større apparater.
3. Vask dine hænder før hver behandling.
4. Anbring det ordinerede lægemiddel i medicinkammeret.

5. Tilslut den ene ende af slangen til kompressorens luftudtag og den anden til bunden af medicinforstøveren. Du er nu klar til at påbegynde behandlingen.
6. Tænd for apparatet for at påbegynde behandlingen.
7. Sluk for apparatet og træk stikket ud, når al medicinen er indgivet i henhold til ordineringen.

UDSKIFTNING AF FILTER

Det skal kontrolleres hver uge, om filteret trænger til udskiftning. Hvis apparatet anvendes med et snavset filter, kan det forringe apparatets funktion - og medføre defekte.

1. Filteret skal skiftes ud, når det er snavset og misfarvet. Filteret må ikke vaskes og genbruges. Filterets gennemsnitlige holdbarhed afhænger af brugen og de omgivelser, hvor apparatet anvendes.
2. Filterholderen skrues af. Nyt filter isættes.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER:

Luftindtaget på apparatet må aldrig blokeres, ved f.eks. at anvende apparatet på et blødt underlag (sofa eller seng). Det skal altid anvendes på et hårdt og frit underlag. Hold luftindtaget fri for fnug, hår og lign. Indfør aldrig objekter ind i luftudtaget.

Må aldrig anvendes, mens man er i bad eller i nærheden af vand. Anbring eller opbevar aldrig apparatet på et sted, hvor det kan falde ned i et badekar eller håndvask.