

Brugervejledning Horton behandling.

Horton`s hovedpine kan behandles effektivt med medicinsk ilt. Behandlingen foregår ved, at du får installeret en medicinsk iltflaske i eget hjem. Ved et anfald skal du trække vejret gennem en ilt-maske, der er tilsluttet den medicinske iltflaske via en reduktionsventil.

Efter 15-20 minutters medicinsk iltbehandling, med et flow på 7 til 8 liter medicinsk ilt i minuttet, oplever mange patienter, at deres hovedpineanfald lindres eller helt forsvinder. Denne behandling er helt uden bivirkninger.



- Åben iltflasken ved at dreje én omgang mod uret.
- Åben reduktionsventilen på det ønskede flow.
- Anbring iltmasken over næse og mund, sørg for at den sidder så behageligt som muligt
- Start behandlingen i forhold til den ordination dig læge har givet.
- **Åben ild eller rygning er ikke tilladt i de rum, hvor behandlingen foregår.**
- **Bestil altid medicinsk ilt i god tid.**

Opstår der et problem eller måtte der være spørgsmål til ovenstående, kan du altid kontakte Medical Danmark A/S på døgnvagt telefon:
65 93 80 18