



Kontrolpanel

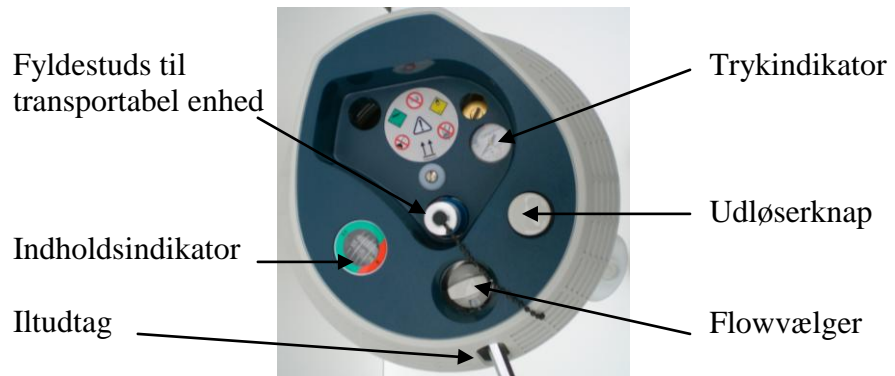

Medical Danmark A/S

Flydende ilt Stationær iltbeholder

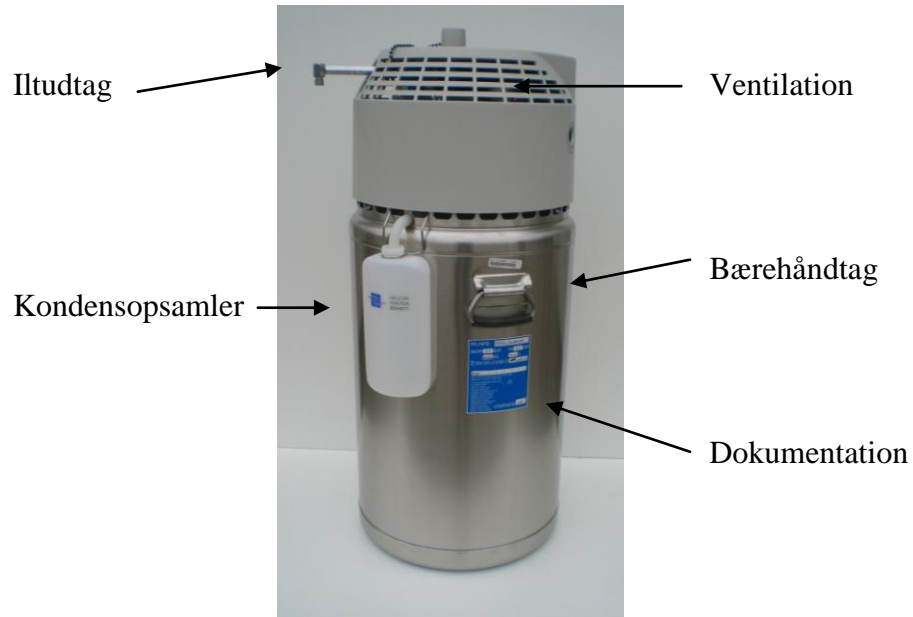

BRUGERMANUAL

Medical Danmark A/S

Advarsel!

Forsigtig: Store mængder af ilt kan være farligt. Luk for iltbeholderen, når den ikke benyttes.
Rør aldrig ved den flydende ilt eller dele, som har været i kontakt med flydende ilt.

Ild: * Høj koncentration af ilt kan medføre kraftig brand.
* Ryg ikke når der er en iltbeholder i huset.
* Hold iltbeholderen væk fra åben ild.
* Anvend ikke olie og fedt på iltbeholderen.

Elektrisk: Hold udstyret væk fra elektriske apparater.

Placering og opstart

1. Stationær flydende ilt skal placeres således der er mulighed for let adgang til beholderen. Beholderen skal kunne køres på specielvogn og må under ingen omstændigheder løftes på plads.
2. Ved forbrug skal trykindikatoren befinde sig i det blå felt. Den gule streg i indholdsindikatoren må ikke befinde sig under 0-linien.
Indstil flowvælgeren til det ønskede flow, fra 0,5 til 6 liter i minuttet. Monter iltslange/næsebrille på iltudtag.
3. Tøm kondensbeholderen efter behov.

3. Der er mulighed for påsætning af fugtflaske. Det anbefales at man først bruger fugtet ilt ved flow over 3 liter pr. minut. Ved tørre slimhinder kan man smøre med en oliefri creme.
4. Når De ikke bruger iltbeholderen, skal der lukkes for enheden.

Ventilation

Det er vigtigt, at sørge for at iltbeholderen er placeret et sted, hvor der er mulighed for ventilation. Beholderen skal placeres væk fra gardiner og må ikke tildækkes.

Forbrug uden overfyldning

41 liters beholder ved 2 liter pr. minut: holdbarhed ca. 11½ dag
31 liters beholder ved 2 liter pr. minut: holdbarhed ca. 8½ dag

Ved overfyldninger til transportabel enhed må der påregnes kortere holdbarhed.

Vedligeholdelse

Udstyret rengøres med en fugtig klud. Kondensbeholder skyldes i en mild sulfoopløsning.