

Tekniske specifikationer

Anvendes til voksne.

SpO₂

Måleområde	70% - 100%
Målenøjagtighed	80% - 100% + - 2%
	70% - 79% + - 3%
	0% - 69% + - uspecificeret

Puls måleområde

Måleområde	30 – 235 BPM
Målenøjagtighed	30 – 100 + - 2%
	101 – 235 + - 2%

Display

Skærmtype	Dobbelt farve led skærm
Parameter	SpO ₂ . Puls. Puls bar.
Menu	8 Visningstilstande
Lysstyrke	Justerbar 10 niveauer
Alarm	For lavt batteriniveau


Batteri

Type	2 AAA Alkaline eller genopladelige batterier
Holdbarhed	ca. 30 timer for normal drift

Elektromagnetisk kompatibilitet

Dette produkt er i overensstemmelse med IEC60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet klasse B

Finger Pulsoximeter

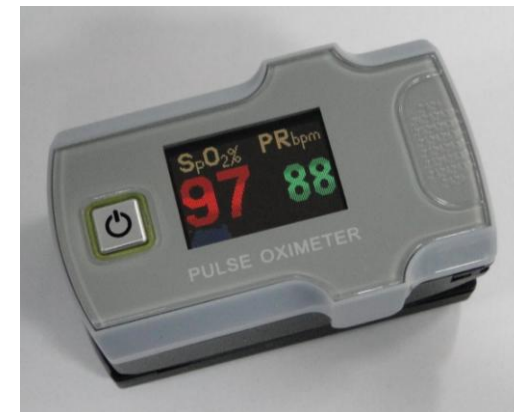


For kontrol af
iltmætning (SpO₂) og puls

Brugervejledning

MEDICAL DANMARK A/S
Industribuen 24, 5592 Ejby

1. Skub batteridækslet i pilens retning
2. Løft den sorte klap op
3. Isæt 2 AAA batterier som vist
4. Plus og minus i samme retning
5. Luk dækslet – skub dækslet til højre

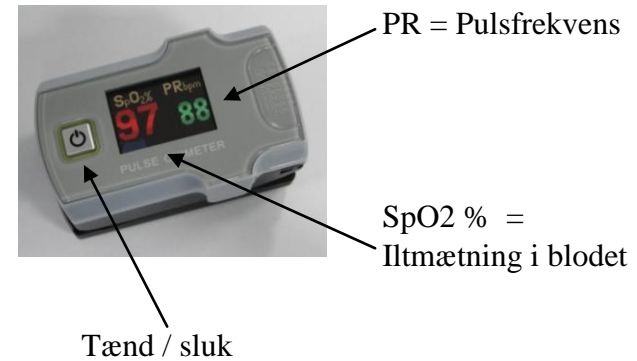

1. Tænd for pulsoximeteret på tænd/sluk knap
2. Sæt pulsoximeteret på en finger
3. Efter kort tid aflæses værdierne:
SpO2 = iltmætning i blodet
PR = pulsfrekvens i minuttet

Tal med din læge eller iltsygeplejerske omkring normalværdier og tilstræbte værdier for dig.

Resultatet kan ikke måles ved anvendelse af neglelak eller hvis fingeren er for kold

4. Efter brug sluk for pulsoximeter tænd/sluk knap
5. Pulsoximeteret slukker automatisk efter 10 sek.



Lysstyrke justeres ved vedvarende tryk på Tænd/sluk.

Eksempler på visningstilstande, ved kortvarigt tryk på Tænd/sluk ændres visningen af målingerne når enheden er tændt.

