

Kontrolpanel

Iltudtag

Flowkontrol

Strømsik
findes på
bagsiden

Timetæller

Kugleflowmeter viser liter pr. minut.
Dosering regnes fra midten af kuglen.
Mulighed for fastlåst flow.



Luftfilter
findes på bagsiden

← Alarm for lav
Iltprocent

← Sikring

← Afbryder

Holder til fugtevand

Medical Danmark A/S

Iltkoncentrator Perfecto2



BRUGERMANUAL

Medical Danmark A/S

Advarsel!

- Forsigtig:** Store mængder af ilt kan være farligt. Sluk derfor koncentratoren, når den ikke benyttes.
- Ild:**
- * Høj koncentration af ilt kan medføre kraftig brand i andre substanser.
 - * Ryg ikke når koncentratoren er i brug
 - * Hold koncentratoren væk fra transportable varmeapparater, komfurer og åben ild.
 - * Olie og fedt antændes let og brænder hurtigt ved tilstedeværelse af koncentreret ilt, forsøg derfor aldrig at smøre koncentratoren.
- Elektrisk:** Brug aldrig koncentratoren, hvis ledning eller stik er defekt.

Placering og opstart

1. Stil koncentratoren et sted, hvor der er fri luftcirkulation og ventilation. Vær sikker på, at der er mindst 30 cm afstand til vægge, møbler og især gardiner, der kan afbryde/mindske lufttilstrømningen. Tilslut netledningen (230V-).
2. Sæt iltslangen på iltafgangstudsens. Hvis Deres læge har ordineret befugtningsapparat, skal flasken fyldes op med destilleret vand til det niveau som er anvist og derefter tilsluttes iltafgangen, og iltslangen sættes på flasken i stedet.
3. Tænd for koncentratoren på tænd/sluk knappen så den røde indikatorlampe lyser og lydalarmeren lyder. Efter nogle sekunder stopper lydalarmeren og den røde iltindikatorlampe stopper med at lyse. Koncentratoren er nu klar til brug

4. Flowet stilles ved at man skruer på knappen på flowmeteret. Dosseringen regnes fra midten af kuglen. (Maskinen kan udstyres med låst flow).
5. Der er mulighed for påsætning af fugtflaske. Det anbefales at man først bruger fugtet ilt ved flow over 3-4 liter pr. minut. Ved tørre slimhinder kan man smøre med en oliefri creme.
6. Når De ikke bruger koncentratoren skal der slukkes på maskinen.

Luftfilter

Den vigtigste vedligeholdelse er rensning af luftindtagsfilteret. Det skal gøres mindst én gang om ugen ved at tage filteret af og støvsuge eller banke det (findes på bagsiden af koncentratoren).

Vedligeholdelse

Man skal tage ledningen ud af stikkontakten ved rengøring og vedligeholdelse. Koncentratoren rengøres med en fugtig klud.

Strømsvigtalarm

Hvis koncentratoren er tændt, men ikke virker, aktiveres der en alarm (der får strøm fra 9v batteri); som oftest forekommer ved at koncentratoren ikke er sat i stikkontakten eller ved strømafbrydelse.

Indikator og alarmer

Der alarmeres ved strømafbrydelse.

Der alarmeres med lys i gul indikatorlampe ved lav iltprocent. Ved alarm skal brugeren kontakte Medical Danmark.