

Kontrolpanel



Fugtevand.
Anbefales + 4 l/m

Kugleflowmeter

Luftindtag på
begge sider.
OBS.
Der bruges ikke
luftfilter på
VisionAire

Iltudtag

Timetæller

Termosikring

Tænd / sluk

Alarm kontakt
MDK.



Kugleflowmeter viser liter pr. minut.
Dosering regnes fra midten af kuglen.
Mulighed for fastlåst flow.

Medical Danmark A/S

Iltkoncentrator VisionAire 3L / 5L



BRUGERMANUAL

Medical Danmark A/S

Advarsel!

- Forsigtig:** Store mængder af ilt kan være farligt. Sluk derfor koncentratoren, når den ikke benyttes.
- Ild:**
- * Høj koncentration af ilt kan medføre kraftig brand i andre substanser.
 - * Ryg ikke når koncentratoren er i brug
 - * Hold koncentratoren væk fra transportable varmeapparater, komfurer og åben ild.
 - * Olie og fedt antændes let og brænder hurtigt ved tilstedeværelse af koncentreret ilt, forsøg derfor aldrig at smøre koncentratoren.
- Elektrisk:** Brug aldrig koncentratoren, hvis ledning eller stik er defekt.

Placering og opstart

1. Stil koncentratoren et sted, hvor der er fri luftcirkulation og ventilation. Vær sikker på, at der er mindst 30 cm afstand til vægge, møbler og især gardiner, der kan afbryde/mindske lufttilstrømningen. Tilslut netledningen (230V-).
2. Sæt iltslangen på iltafgangstudsens. Hvis Deres læge har ordineret befugtningsapparat, skal flasken fyldes op med destilleret vand til det niveau som er anvist og derefter tilsluttes iltafgangen, og iltslangen sættes på flasken i stedet.
3. Tænd for koncentratoren på tænd/sluk knappen så den gule indikatorlampe lyser og lydalarmeren lyder. Efter nogle sekunder stopper lydalarmeren og den gule iltindikatorlampe stopper med at lyse efter ca. 45 sekunder. Koncentratoren er nu klar til brug

4. Flowet stilles ved at man skruer på knappen på flowmeteret. Doseringen regnes fra midten af kuglen. (Maskinen kan udstyres med låst flow).
5. Der er mulighed for påsætning af fugtflaske. Det anbefales at man først bruger fugtet ilt ved flow over 3 liter pr. minut. Ved tørre slimhinder kan man smøre med en oliefri creme.
6. Når De ikke bruger koncentratoren skal der slukkes på maskinen.

Luftindtag

Vedligeholdelse af luftindtag mindst én gang om ugen, ved at støvsuge det. Luftindtag findes på begge sider af koncentratoren. (Luftindtag ved håndtag i begge sidder)

Vedligeholdelse

Man skal tage ledningen ud af stikkontakten ved rengøring og vedligeholdelse. Koncentratoren rengøres med en fugtig klud.

Strømsvigtalarm

Hvis koncentratoren er tændt, men ikke virker, aktiveres der en alarm (der får strøm fra 9v batteri); som oftes forekommer ved at koncentratoren ikke er sat i stikkontakten eller ved strømafbrydelse.

Indikator og alarmer

Der alarmeres ved lukket flow eller knæk på slangen ved lydsignal. Der alarmeres med lys i gul indikatorlampe ved lav iltprocent. Ved begge typer alarmer skal brugeren kontakte Medical Danmark.