

RENGØRING

Rengøring af kabinettet foretages med en fugtig klud eller en mild desinficerende opløsning. Anvend ikke opløsninger af rengøringsmidler og undgå kontakt med overdreven fugtighed.

Alle sugeglasseparts dele samt forbindelsesstykket rengøres ved varm desinficerende vask ved 85 grader eller ved hjælp af normal varm autoklavering ved maximal temperatur på 138 grader. Opløsningsmidler må ikke benyttes.

Sugeglasset rengøres dagligt i en mild sulfoopløsning.

Sugeslanger og kateter skylles efter hvert brug med rent vand.


Såfremt bakteriefilteret er blevet gråligt eller vådt skal det udskiftes. Ved dagligt brug udskiftes filter en gang pr. mdr.

Vedligeholdelse af batteri på Sam 420 sug.

- Sam 420 har ubegrænset sugetid på lysnet.
- Sam 420 har ubegrænset sugetid på bilens 12V udtag. (CIGARETTÆNDERSTIK)
- Sam 420 suger kontinuerligt op til 35 minutter på fuldt opladt batteri.
- Ved dagligt brug af suget er det vigtigt at suget aflades ca. en gang pr. mdr. Er suget ikke i brug dagligt sættes suget til afladning to gange årligt.
- Afladning foretages ved at tænde for suget og lad det køre til batteriet er fladt, derefter sættes suget til opladning i 12 timer.

MEDICAL DANMARK A/S

Transportabel sug SAM 420

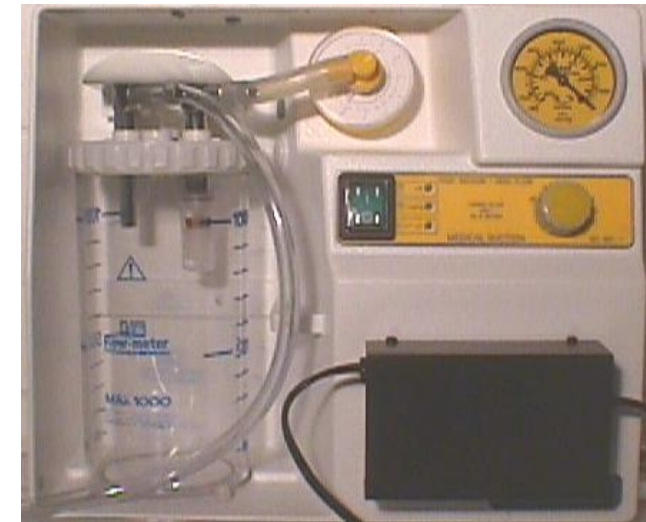

BRUGERMANUAL

MEDICAL DANMARK A/S

BETJENINGSVEJLEDNING

Tilslut 12V strømforsyningen til suget. Den gule ladelampe og den grønne eksternlampe vil nu lyse. Suget vil nu have ubegrænset sugtid.

Er suget i brug uden strømforsyning og batteriet i suget er fuldt opladt, er sugetiden ca. 35 min.

Når den røde lampe lyser er der ca. 10 min. effektiv sugetid tilbage. For at opnå fuldt opladt batteri, skal suget være tilsluttet lysnettet via strømforsyningen i 14 timer efter den røde lampe har lyst.

Når batteriets opladningstilstand er ukendt, er det tilrådeligt at oplade i 14 timer.

Der er mulighed for at tilslutte suget til bilens cigarettænder, 12 V.

Forbind en katete til den ene ende af sugeslangen og forbind den anden ende til patient inlet røret – mærket med patient – på sugeglassets låg. Kontroller at bakteriefilteret er monteret (grønt bakteriefilter er et aqfilter, der blokerer ved overløb).

Tænd for suget ved at trykke på den grønne vippekontakt.

For at indstille vakuomet skal slangen til patienten knækkes og derefter kan man på vakuumkontrolknappen indstille det ønskede vakuum (drejning med uret øger vakuomet). Vakuumsuget er nu klar til brug.

Dette sug er udstyret med en overløbsventil, der lukker for vakuomet, når dets indhold overstiger 1000 ml.

Det tilrådes derfor, at man så ofte som muligt tømmer og rengør sugeglasset.

