

## TILBEHØR OG TIDSSKEMA TIL TRANSPORTABEL ILTFLASKE



Skuldertaske



Rygsæk



Transportvogn

Eksempel på tid ved brug af flasker:

Flow		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
2 L flaske	timer	13.20	6.40	4.25	3.20	2.40	2.15
5 L flaske	timer	33.20	16.40	11.05	8.20	6.40	5.30

2L flaske med forbrug på 2,5 L/M giver en varighed på: 2 t 40 m.



Ved håndtering af iltflasker er tobaksrygning og brug af åben ild forbudt grundet brandfare

# Transportabel ilt




---







## BRUGERMANUAL

---

## MEDICAL DANMARK A/S

## MONTERINGSVEJLEDNING

Medical Danmarks konsulenter skifter ventiler på følgende måde:

-  1. 2 liters ilflaske
-  2. Flaskeventil pin index
-  3. Top af flaskeventil
-  4. Reduktionsventil med manometer samt flowvælger
-  5. Ventil sæde og pinde
-  6. Håndtag for åbning og lukning

For at kunne bruge ilflaskeindhold er det nødvendigt at montere en reduktionsventil på flasken.



Monter reduktionsventilen over flaskeventilen således at pindene på reduktionsventilen passer til hullerne på flaskeventilen.




Drej nu vingmøtrikken på reduktionsventilen således at denne fastgøres på flaskeventilen.

Brug kun håndkraft  
Der må ikke gøres brug af værktøj



Monter håndtag på toppen af flaskeventil og drej en omgang mod uret retning, for at åbne for flasken.  
Den gule nål i manometeret viser nu flaskens indhold

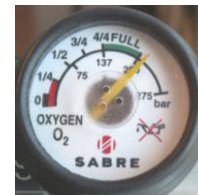

Eksempel: Manometeret viser nu fuld flaske.



Indstil nu det ønskede flow på det takkede drejhjul på enden af reduktionsventilen.  
Eksempel: 1 liter i minuttet  
Monter iltslange på studs  
Ventilen lukkes igen efter brug.